

## **MASCHERINA IN COTONE E TNT**

**Mascherina Lavabile, prodotta in deroga alle norme vigenti,  
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, artt.15 e artt. 16.**

**Non è un presidio medico chirurgico;**

**Non indossare sotto i 3 anni di età;**

**Non è un dispositivo di protezione individuale;**

**Composizione: Piquet 100% cotone, TNT.**

**Sanificabile e riutilizzabile fino a 10 volte.**

**Istruzioni complete sul sito: [www.presentebimbo.it](http://www.presentebimbo.it)**

**Prodotto da: Presente di Piovesan Massimo,**

**Via Fosse, 26 – 31020 Villorba (TV)**


**P.IVA 04728710262**

**[www.presentebimbo.it](http://www.presentebimbo.it)**


## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- La mascherina è composta da tre strati a “Sandwich”: due strati di Piquet 100% cotone separati da uno strato in TNT (tessuto non tessuto) all’interno.
- La mascherina è sviluppata su modello a conchiglia avvolgente, con cuciture su tutti i lati (non presenta collanti).
- Non presenta elementi metallici, si sagoma perfettamente al volto.
- Dispone di doppi elastici regolabili.
- E’ concepita per poter essere lavabile e riutilizzabile (previa sanificazione).

## SCHEMA COSTRUTTIVO E FOTOGRAFIE

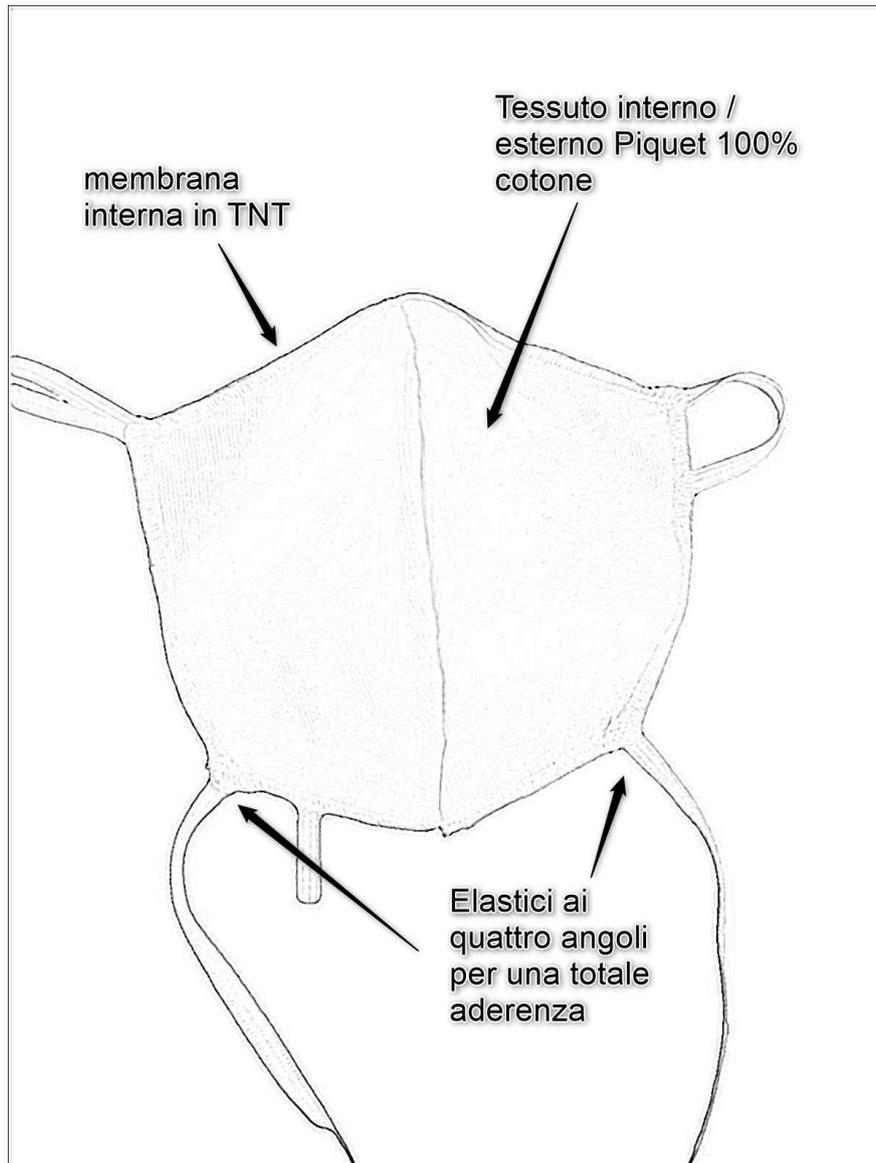

## STRATI E COMPOSIZIONE DEI TESSUTI

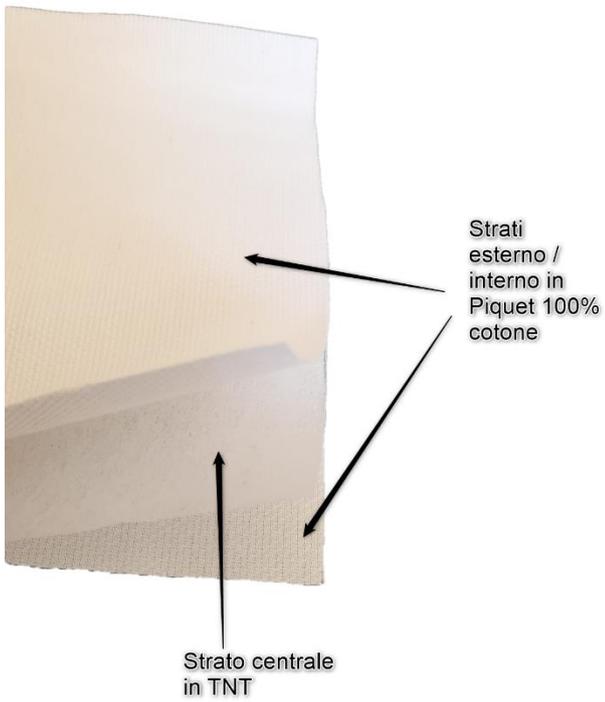

Tutto il corpo della mascherina è costituito di tre strati: due superficiali in Piquet 100% cotone, mentre lo strato interno filtrante è in TNT.

## VISTA FRONTALE




## CUCITURE

L'elastico è saldamente cucito alla struttura (senza punti metallici).



## INDOSSABILITA'

La mascherina è aderente al volto ed ottimale anche in presenza di occhiali.

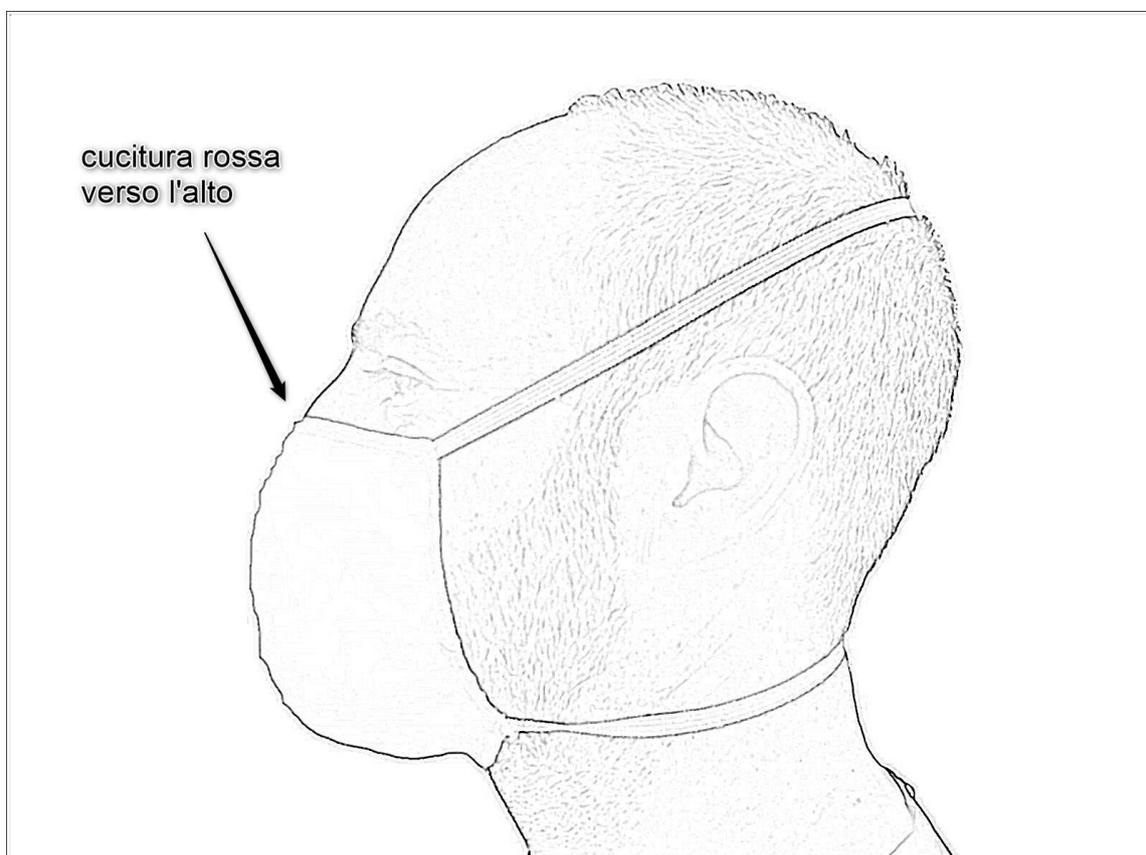

## LAVAGGIO E SANIFICAZIONE

Il prodotto può essere riutilizzato, previa sanificazione, ed è stato testato fino a 10 lavaggi.

Istruzioni per la sanificazione:

- 1) Inserire la mascherina in una bacinella
- 2) Bagnare omogeneamente il tessuto con alcool o altro sanificante.
- 3) Attendere 10 minuti
- 4) Lavare a mano con acqua a 30 gradi e asciugare.

